

Mascherina filtrante protettiva, lavabile, in tessuto misto, elasticizzata, antimicrobica, idrorepellente, destinata ad essere usata per la protezione delle vie aeree (naso e bocca) per evitare contaminazioni da e verso le altre persone.

Per adulti e bambini superiori ai 6 anni.

Adatta anche per proteggersi durante le medicazioni casalinghe.

Il tessuto in doppio strato tubolare è stato sottoposto a specifici trattamenti:

-Antimicrobico: a base di Zinco Piritione (BIS 1-idrossi-2(1H)pyridinotionato-O.S), testato ISO 22196 EPA Registered.

-impermeabilizzante: conforme a OEKO-TEX®, requisiti standard 100 e ZDHC, per evitare che le goccioline acquose oltrepassino il tessuto.

Garanzia di sicurezza certificato 9526505 OEKO TEST, **attestante l'innocuità delle fibre per la salute umana**

Come mettere la mascherina:

- Igienizzare le mani lavandole abbondantemente con acqua e sapone.
- Rimuovere la mascherina dalla confezione.
- Visualizzare il lato interno della mascherina che è evidenziato dai fili colorati apposti ai lati.
- Indossare la mascherina posizionando uno alla volta gli elastici dietro le orecchie.
- Tirare la parte inferiore della mascherina verso il basso per coprire completamente naso, bocca e mento

Come togliere la mascherina e manutenzione:

- Prenderla dall'elastico, evitando di toccare la parte anteriore
- E' consigliato l'uso giornaliero e poi il lavaggio
- Riporre per il lavaggio
- Lavarsi le mani
- Lavaggio a 60° senza ammorbidenti
- Resistenza dei trattamenti del tessuto: 10 lavaggi
- Terminato l'uso smaltire in un sacchetto nei rifiuti indifferenziati

Dati tecnici

- **Tessuto mascherina:** poliestere, poliammide, polipropilene, elasthan.
- **Dimensioni:** adulti mm 170x100, bambini oltre 6 anni 130x100
- **Colori:** Bianco, Jeans, Fondo bianco con soggetti colorati

A & R PHARMA SRL
Via Cave, 178
25082 BOTTICINO (BS)
P.IVA/C.F. 03825780988

direzionecommerciale@herpaso.it
www.herpaso.it

